



Attelle de pouce CMC

Informations de commande
Distance entre le pli distal du
poignet et l'articulation IP

TP	entre 8,6 et 9,2 cm
P	entre 9,2 et 10 cm
M	entre 10 et 11 cm
G	plus de 10 cm

Cuirette ferme

		Gauche	Droit
REF	TP	NC16330-FEI	NC16331-FEI
REF	P	NC16332-FEI	NC16333-FEI
REF	M	NC16334-FEI	NC16335-FEI
REF	G	NC16336-FEI	NC16337-FEI

Cuir

		Gauche	Droit
REF	TP	NC15515-7FEI	NC15515-8FEI
REF	P	NC15515-1FEI	NC15515-2FEI
REF	M	NC15515-3FEI	NC15515-4FEI
REF	G	NC15515-5FEI	NC15515-6FEI


Attelle de pouce Liberty™ CMC

Indications d'emploi

L'attelle de pouce Liberty™ CMC offre un support et une protection des articulations CMC et MP, tout en laissant le poignet et les doigts libres. Elle permet de soulager les symptômes associés à l'arthrite des articulations CMC et MP, aux entorses du pouce et aux lésions provoquées par les mouvements répétitifs.

Mode d'emploi

1. Posez la main sur l'attelle comme illustré (figure A).
2. Installez l'attelle autour du pouce et fermez la partie autoagrippante (figure B).
3. Enfilez la courroie du poignet dans la fente (figure C).
4. Tirez la courroie sur le poignet et fermez la partie autoagrippante. La courroie peut être coupée si elle est trop longue (figure D).

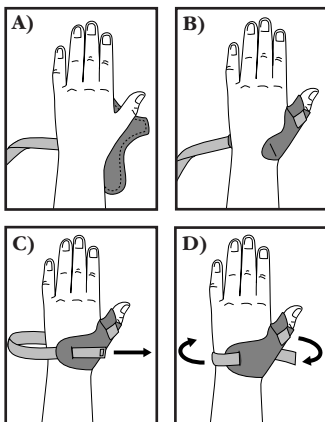

Entretien :

Cuir

Nettoyez avec un nettoyant pour cuir ou lavez dans de l'eau additionnée d'un savon doux. Laissez sécher à l'air.

Cuirette ferme

Lavez en machine et laissez sécher à l'air; fermez les bandes autoagrippantes avant le lavage.

Réservé à un
seul patient



Fabriqué par :
North Coast Medical, Inc.
www.ncmedical.com

©2013 North Coast Medical, Inc.
Gilroy, CA 95020



CMC Thumb Splint

Order Information

IP Joint to distal wrist crease

XS	3 $\frac{3}{8}$ " to 3 $\frac{5}{8}$ "	(8.6 to 9.2 cm)
S	3 $\frac{5}{8}$ " to 4"	(9.2 to 10 cm)
M	4" to 4 $\frac{1}{2}$ "	(10 to 11 cm)
L	Over 4 $\frac{1}{2}$ "	(over 10 cm)

Firm Leatherette

		Left	Right
REF	XS	NC16330-FEI	NC16331-FEI
REF	S	NC16332-FEI	NC16333-FEI
REF	M	NC16334-FEI	NC16335-FEI
REF	L	NC16336-FEI	NC16337-FEI

Leather

		Left	Right
REF	XS	NC15515-7FEI	NC15515-8FEI
REF	S	NC15515-1FEI	NC15515-2FEI
REF	M	NC15515-3FEI	NC15515-4FEI
REF	L	NC15515-5FEI	NC15515-6FEI


Liberty™ CMC Thumb Splint

Indications

The Liberty™ CMC Thumb Splint provides support and protection to the CMC and MP joints, while leaving the wrist and fingers free. The Liberty™ CMC Thumb Splint can be used for relieving symptoms associated with CMC and MP joint arthritis, thumb strain or sprain and repetitive motion injuries.

Instructions for Use

1. Place hand over splint as shown (**Figure A**).
2. Fit splint to thumb, securing hook and loop closure around thumb (**Figure B**).
3. Thread the wrist strap through the slot (**Figure C**).
4. Pull the strap back over the wrist and secure with hook tab (**Figure D**). The straps may be trimmed as needed.

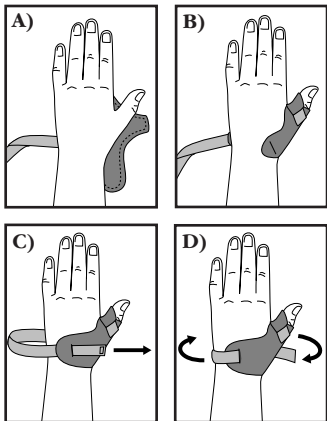

Instructions For Care:

Leather

Clean with a leather cleaner or wash with a mild soap in water. Air dry.

Firm Leatherette

Machine wash and air dry; secure hook and loop prior to washing.

Single
Patient Use



Manufactured by:
North Coast Medical, Inc.
www.ncmedical.com

©2013 North Coast Medical, Inc.
Gilroy, CA 95020

REV15515-1FEIpi_0713